

JOINSTAR CE SELBSTTEST 1er (COLLOIDAL GOLD)

zum qualitativen Nachweis neuartiger Coronaviren in anterior-nasalen (kurze Nase!) Abstrichproben; CE-zertifiziert als Selbsttest zur Eigenanwendung in Soft Bag



Produkt

Joinstar COVID-19 Antigen Rapid Test (Colloidal Gold) – CE: Jetzt auch CE-zertifiziert für die Eigenanwendung zum Verkauf in der gesamten EU (BfArM-Test-ID AT1276/21)

Technische Daten

Verpackt in Soft Bags: 1 Test/Kit; VPE: 400 Test Kits

Verwendungszweck

Der COVID-19 Antigen Assay (kolloidales Gold) ist ein qualitativer Test auf Basis eines Immunoassays zum Nachweis von SARS-CoV-2 Nucleocapsid-Protein-Antigenen in Abstrichproben. Während dieses Tests reagiert die Probe

mit einem Anti-SARS-CoV-2-Antikörperkonjugat auf dem Polster, das mit Partikeln beschichtet ist und dann wandert das Gemisch durch Kapillarwirkung nach oben auf das Membranchromatogramm und reagiert mit einem SARS-CoV-2-Antikörper in der Nachweizone. Wenn die Probe SARS-CoV-2 enthält, erscheint im Bereich der Testlinie eine farbige Linie, die ein positives Ergebnis anzeigt. Wenn die Probe kein SARSCoV-2 enthält, erscheint in diesem Bereich keine farbige Linie, was auf ein negatives Ergebnis hinweist. Als Prozesskontrolle erscheint im Bereich der Kontrolllinie immer eine farbige Linie, die anzeigt, dass ein geeignetes Probenvolumen zugegeben wurde und ein Membrankernziehen stattgefunden hat.

Bestandteile

1. Coronavirus-Antigen-Testkassette
2. Extraktionspuffer
3. Steriler Tupper (für die Probenentnahme)
4. Müllbeutel für Gefahrstoffe
5. Gebrauchsanweisung

Lagerung und Haltbarkeit

1. Der Test ist 2 Jahre haltbar, wenn alle Teile in versiegelten Beuteln bei +2°C bis 30°C gelagert werden und die Verpackung ungeöffnet und unbeschädigt ist.
2. Der Test sollte bis zur Verwendung im versiegelten Beutel aufbewahrt werden. Frieren Sie den Test nicht ein und verwenden Sie ihn nicht nach Ablauf des Verfallsdatums.
3. Herstellungsdatum und Verfallsdatum siehe Etikett.

Ihre Vorteile im Überblick:

- ◆ Anterior-nasal (kurze Nase!) Test in Soft Bag
- ◆ Spezifität: 99,2% Sensitivität: 96,1%
- ◆ Leicht zu bedienen, Ergebnis in 15 Minuten
- ◆ Alle Testkomponenten sind enthalten
- ◆ Ergebnisse zeigen keine Kreuzreaktivität
- ◆ Haltbarkeit: 2 Jahre
- ◆ BfArM gelistet
- ◆ PEI (Paul-Ehrlich-Institut) evaluiert
- ◆ CE-zertifiziert als Selbsttest zur Eigenanwendung

JOINSTAR CE SELBSTTEST 1er (COLLOIDAL GOLD): CE-zertifizierter Selbsttest zur Eigenanwendung

Corona-Schnelltest mit anterior-nasalen (kurze Nase!) Abstrichproben

Joinstar COVID-19 Antigen Rapid Test (Colloidal Gold) - CE	CE zertifiziert als Selbsttest zur Eigenanwendung	anterior-nasale (kurze Nase!) Proben	Spezifität 99,2 %	Sensitivität 96,1%	Lagerung bei Raumtemperatur	Verpackt in Soft Bags: 1 Test/Kit; VPE: 400 Test Kits
EAN Code: 9180001670134	Kartoninhalt: 400 Tests	Höhe 29 cm Breite 39 cm Länge 59 cm	Gewicht: Einzelartikel: 0,026 KG Karton: 10,4 KG	Europalette: 9600 Tests	4 Kartons/Lage; 6 Lagen hoch; Höhe: ca 185 cm	32 Paletten pro LKW = 307.200 Tests pro LKW